

OBSERVER 

ANALYSER 

 CRÉER 

# SUBLYM<sup>®</sup>

FACETTES PELLICULAIRES

Un protocole de pose simplissime  
pour un résultat esthétique optimal



**AXENTISS**  
LA SCIENCE DU SOURIRE

# SUBLYM<sup>®</sup>

## FACETTES PELLICULAIRES



Pourquoi utiliser les facettes SUBLYM <sup>®</sup>	4
Cas d'utilisation SUBLYM <sup>®</sup>	5
Un sourire SUBLYM <sup>®</sup> en 5 étapes	6
Protocole de pose SUBLYM <sup>®</sup>	8
Pour vous aider...	10



AXENTISS est une société française spécialisée, créée par des passionnés de l'univers dentaire. Par une approche résolument centrée sur l'innovation, nous avons à coeur d'apporter de la fluidité, de l'ergonomie et de la modernité dans la pratique clinique des praticiens qui œuvrent chaque jour à rendre leur plus beau sourire à leurs patients. AXENTISS conçoit, produit, sélectionne et met à la disposition des praticiens des équipements et instruments dentaires afin de les aider, tout au long du process de soin, à observer, analyser et créer.

AXENTISS a ainsi conçu SUBLYM<sup>®</sup>, de nouvelles facettes pelliculaires, pour atteindre avec la plus grande précision les objectifs esthétiques souhaités par vos patients, tout en préservant leurs dents saines. Un protocole de pose simple a également été mis au point afin de faciliter le travail en cabinet et de gagner du temps tout en étant sûr et efficace.

N'hésitez-pas à rendre leur plus beau sourire à vos patient avec les facettes pelliculaires SUBLYM<sup>®</sup>.

## Pourquoi utiliser les facettes SUBLYM® ?

Que les dents de vos patients soient mal alignées, fêlées, décolorées et même en cas de diastème, les facettes pelliculaires SUBLYM® permettent de redonner, aux sourires de vos patients, un aspect plus esthétique tout en préservant leurs dents naturelles. Selon les cas, 2 ou 3 rendez-vous peuvent suffire. Rapide et simplifié, le protocole de pose ne nécessite pas d'anesthésie et la préparation des dents est très réduite.

Particulièrement fines et résistantes, les facettes SUBLYM® permettent ainsi une pose sans altération de l'intégrité de l'émail ou de la dentine et préservent les dents naturelles. Avec une  **finesse remarquable**  jusqu'à  **0,2 mm** , elles s'ajustent parfaitement au niveau du collet, ne nécessitent que très peu de retouches, tout en assurant un collage optimal sur l'émail, bien plus durable que sur la dentine.

Les facettes SUBLYM® sont réalisées à partir d'une céramique polycristalline : la zircone. Contrairement à une céramique feldspathique de type disilicate de lithium, la zircone permet de réduire et de simplifier la préparation des surfaces prothétiques et dentaires tout en conférant aux facettes SUBLYM®, une résistance et une longévité incomparables.

### POUR LES PATIENTS :

- Sans anesthésie
- Dents naturelles préservées
- Traitement réversible
- Un résultat esthétique sur mesure
- Une longévité exceptionnelle

### POUR LES PRATICIENS :

- Sans anesthésie
- Sans préparation invasive
- Protocole simplifié, identique à celui d'une couronne full zircone
- Gain de temps au fauteuil
- Facettes ultra-fines et très résistantes
- Garantie 5 ans
- Traitement réversible

## Un matériau d'exception pour des facettes exceptionnelles

Céramique de 4ème génération, la zircone choisie pour les facettes SUBLYM® a été élaborée en vue de la conception de prothèse monolithique. Ce  **matériau très résistant** , la zircone, est caractérisée avec un triple gradient de couleur, translucidité. Le résultat est une restauration avec des  **nuances de couleurs naturelles** , une résistance à la flexion extrêmement élevée au niveau du collet et un  **bord incisal hautement translucide** .

## Cas d'utilisation des facettes SUBLYM®

- Esthétique générale à améliorer
- Teintes trop foncées / Décoloration / Taches
- Désalignements / Malocclusions
- Restaurations antérieures inesthétiques
- Dents usées / éclats / Fêlures
- Dents absentes / Agénésie
- Diastèmes

Exemples de cas traités avec les facettes SUBLYM®:



Cas Dr JACOMART

Cas Dr NEGRE

Cas Dr BRU

Cas Dr BESSIERE

SUBLYM®  
FACETTES PELLICULAIRES

**5ans**  
GARANTIE

# Un sourire SUBLYM® en 5 étapes

1

## Recueil des données cliniques patient

- Réaliser une empreinte numérique
- Réaliser un scanner facial du patient\*
- Réaliser un scanner de teinte

2

## Préparation du projet prothétique

- Renseigner le diagnostic initial du patient
- Cibler les spécifications générales
- Cibler les spécifications de formes de dents souhaitées
- Choisir les options voulues selon les besoins du patient

3

## Transmission du dossier à Axentiss

- Envoi des éléments à AXENTISS [Projet de traitement = fiche client SUBLYM®, empreinte numérique + Photos et/ou Scan facial]
- Axentiss renvoie la modélisation du projet prothétique en fichier HTML 3D.

4

## Réception et validation du Smile Design Numérique

- Grâce à la modélisation 3D au format HTML, vous validez le projet avec votre patient à distance ou au cours d'un court rendez-vous.
- Confirmez la validation par mail à : [sublym@axentiss.com](mailto:sublym@axentiss.com)
- Vous recevez les éléments commandés selon vos options sélectionnées dans un délai de **4 semaines maximum**.

5

## Pose des facettes pelliculaires SUBLYM®

- Noubliez-pas de prendre des photos avant la pose et juste après, dans les mêmes conditions de lumière, afin de montrer au patient le « Avant / Après » et qu'il retrouve l'envie de sourire !

### Axentiss vous accompagne pour la préparation de votre cas.

Selon les attentes et exigences esthétiques du patient, il peut être nécessaire d'adapter le protocole avec une ou plusieurs options. Votre cas est réalisé en toute sérénité, avec la plus grande précision, pour un rendu esthétique optimal :



- **Modèle résine** par impression 3D pour essai
- **Guide pour gingivectomie**, idéalement réalisée au laser afin de ne pas provoquer de saignement / réduire la douleur / réduire le temps de cicatrisation
- **Gouttière mock-up** (servant de guide pour les microcorrections)

## Données cliniques & morphologiques



Scanner Facial 3D et/ou Clichés patient selon recommandations

▲ Empreinte numérique Maxillaires (inf. & sup.) + occlusion



Projet prothétique

Fiche projet Sublym

PROJET SUBLYM



[sublym@axentiss.com](mailto:sublym@axentiss.com)

▲ Compilation et transmission de votre projet



▲ Validation du Smile Design Numérique de votre patient



▲ Votre patient arbore un sourire Sublym !

Les facettes SUBLYM sont prêtes à être posées



Les facettes SUBLYM® vous intéressent ?

N'hésitez-pas à nous contactez au **05 23 53 15 43** pour connaître les programmes et dates de formations SUBLYM®

## Un protocole\* de pose simplissime

**1. NETTOYAGE**  
Eau  
Air

**2. ESSAI**  
Eau  
Air

**3. ETCHING\*\***  
(mordançage)  
Rincez et séchez.  
10 secondes  
20 secondes  
Eau  
Air

**4. COLLAGE 1**  
séchez  
20\* secondes

**5. COLLAGE 2**  
séchez  
20\* secondes

**6. CIMENT-COLLE**  
et pose de la facette

**7. PHOTO-POLYMÉRISATION**

**8. PHOTO-POLYMÉRISATION finale**

\* à ajuster selon les recommandations du fabricant des produits de collage utilisés  
\*\* uniquement sur émail

**1. NETTOYAGE :** Nettoyez et séchez le tissu dentaire de manière habituelle.

**2. ESSAI** d'adaptation et ajustement : positionnez la facette sur la dent pour vérifier son ajustement.

**3.** Réaliser un «**ETCHING\*\***» (mordançage) pendant 10s pour optimiser l'adhérence de la facette. Rincez et séchez.

**4. COLLAGE 1 :** Appliquez la première colle sur la surface prothétique et séchez. (cette étape n'est pas systématique selon le kit utilisé).

**5. COLLAGE 2 :** Appliquez la seconde colle (agent adhésif auto-mordançant)

sur l'élément dentaire et laissez agir 20\* secondes avant de sécher. (selon le kit utilisé, cette colle est parfois photo-polymérisable)

**6. CIMENT-COLLE :** Appliquez la pâte de collage sur la surface prothétique et posez la facette.

**7. PHOTO-POLYMÉRISATION :** Polymérisez selon les recommandations du fabricant des produits de collage utilisés. Retirez l'excédent de pâte.

**9. PHOTO-POLYMÉRISATION FINALE :** Polymérisez selon les instructions du fabricant des produits de collage utilisés.

### KIT DE COLLAGE RECOMMANDÉ

Poser les facettes Sublym en suivant le protocole de pose du ciment-colle utilisé.

Exemples de produits recommandés :

**NORITAKE PANAVIA V5** <sup>1</sup>,

**GC GCEMONE** <sup>1</sup>,

**3M RELYX ULTIMATE** <sup>1</sup>,

...

**IMPORTANT :** l'intrados des facettes SUBLYM a subi un microsablage, il n'est donc pas nécessaire de les préparer à nouveau (comme indiqué dans les notices des produits de collage).

<sup>1</sup> Toutes les marques mentionnées dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Leur utilisation n'implique aucune affiliation ou approbation par ces derniers.



Et pour vous faciliter la pose des facettes péliculaires SUBLYM®...



### Spectrophotomètre : Cobra Shade Scan

Pour la réalisation d'une prothèse dentaire, deux types d'informations sont essentielles à transmettre au laboratoire pour une intégration parfaite en bouche :

- Les informations dimensionnelles numérisées avec précision grâce à votre scanner intraoral.
- Les informations colorimétriques enregistrées puis transmises grâce au spectrophotomètre et la suite logicielle Vision Shade Scan de Borea.

Ainsi vous bénéficiez pour la première fois d'un flux de travail tout numérique et de ses nombreux avantages.



### Aides optiques : Loupes & lumières ILLUCO



Les loupes et les lumières offrent un grossissement "mains libres" dans un domaine où la précision est primordiale. Quelle que soit la qualité de votre vision, les loupes et les lumières vont l'améliorer. Elles vous permettent de voir des détails incroyables et de travailler avec une plus grande précision lors de la pose de facettes SUBLYM® par exemple. Les loupes et les lumières sont la clé d'une bonne ergonomie de travail. Elles sont conçues pour permettre aux praticiens de travailler dans une position correcte, agréable et sans douleur cervicale ou lombaire.



### Scanner facial 3D : MetiSmile

MetiSmile est le premier scanner facial développé et produit exclusivement pour la dentisterie. Il peut capturer rapidement les informations faciales pour créer un modèle 3D, aider au diagnostic clinique grâce à son logiciel avancé et pré-visualiser la restauration attendue.

### Scanner intraoral sans fil : AoralScan 3W

Profitez de la liberté de numérisation sans fil, sans aucune contrainte de câbles ! Équipé de la dernière technologie Wi-Fi 6, l'AoralScan 3 Wireless vous offre la même expérience de numérisation rapide qu'une connexion filaire sans aucun décalage. Il fournit une sortie de numérisation fiable, cohérente et précise afin de commander et fabriquer vos facettes SUBLYM®.




### Laser diode sans fil : K2 mobile



Entièrement sans fil, le Laser diode K2 Mobile s'avère particulièrement maniable. Grâce à une conception innovante, il ne nécessite que très peu de consommables pour un coût d'utilisation réduit. La longueur de la fibre optique s'ajuste aux besoins des praticiens. Cette fonctionnalité brevetée en fait un laser unique et particulièrement performant.



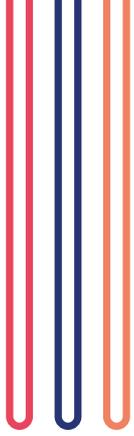

Un conseil,  
une question ?

 05 23 53 15 43

 [contact@axentiss.com](mailto:contact@axentiss.com)



Découvrez notre sélection d'équipements et  
d'instruments dentaires sur [www.axentiss.com](http://www.axentiss.com)



HULASER

ILLUC

NSK

SHINING 3D  
DENTAL

zebris

 AXENTISS SAS

19 rue Guillaume Ibos  
31200 Toulouse - FRANCE

Les produits cités dans ce document sont des dispositifs médicaux sur mesure utilisés pour la réalisation de soins dentaires par des professionnels de santé habilités. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés, mais ne portent pas le marquage CE en raison de leur nature sur mesure. Lire attentivement les instructions figurant sur les notices des produits. Toutes les informations indispensables pour un bon usage de ces dispositifs sont disponibles auprès de AXENTISS SAS.